

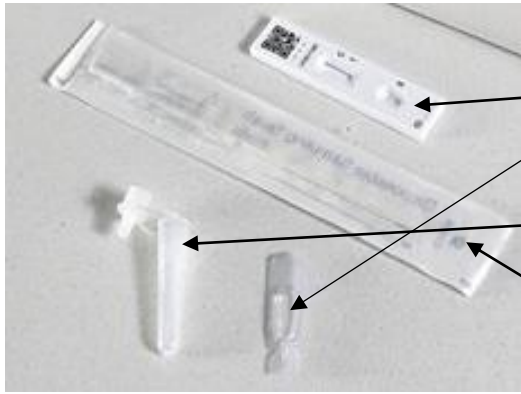
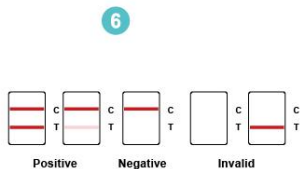
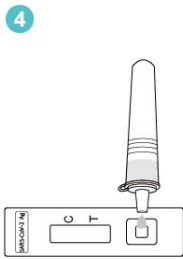
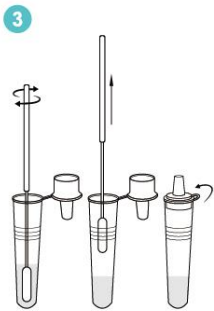


GREITOJO ANTIGENO TESTO NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

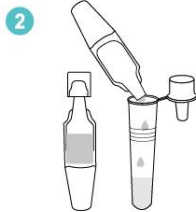

Pakuotės sudėtis:

1. Testavimo kasetė
2. Ekstrahavimo buferinis tirpalas
3. Mėgintuvėlis su lašikliu
4. Tamponėlis

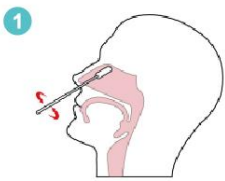

1. Priekinėje nosies landoje pagaliuką su tamponu pasukiojame bent po 4 kartus abiejose nosies landose.

2. Paimame mėgintuvėlį su lašikliu. Įlašinkite į mėgintuvėlį 8 lašus ekstrahavimo buferinio tirpalo.

3. Pagaliuką su tamponu (kur sukiojome nosies ertmėje) įkišame į mėgintuvėlį, pasukiojame 10 kartų ir paspaudžiame šonus. Pagaliuką išmetame, o mėgintuvėlį užspaudžiame kamšteliu.

4. Mėgintuvėlyje esančio skysčio 2-3 lašus įlašiname į kasetės apačioje esančią angą S raide.

5. Laukiame 10-15 min.

6. Jeigu išryškėja vienas brūkšniukas ties C raide, jūsų rezultatas NEIGIAMAS, jeigu atsiranda ir antras brūkšniukas ties T raide, jūsų rezultatas TEIGIAMAS ir jums reikia pakartotinai atlikti PGR testą iš nosiaryklės

registruojantis į mobilių covid-19 tyrimų punktą tel. nr. 1808 arba koronastop.lt

Testavimosi namie data: 2022 m. sausio 9 d. (prieš grįžimą į mokyklą).